

НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ НУ-10

ПАСПОРТ
2.899.004 ПС,

КИЕВ ОБПОЛИГРАФИЗДАТ 1984

Библиотека Ладовед 2019г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Наконечник угловой НУ-10 предназначен для крепления зубных боров и дискодержателей, а также для передачи вращения этим инструментам от бормашины.

Наконечник применяется в стоматологических кабинетах.

Условия эксплуатации: температура воздуха от 10 до 35°С, относительная влажность—не более 80% при 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Частота вращения, об/мин	до 10000
Передаваемый крутящий момент Н-м(кгссм)	0,15(1,5)
Направление вращения закрепляемого инструмента	правое и левое
Время непрерывной работы, с, не более	30
Время простоя, с, не менее	60
Диаметр закрепляемого инструмента, мм	2,35
Длина наконечника, мм	140
Масса, кг, не более	0,080
Средний ресурс наконечника, час, не менее	200
Средний ресурс зажимного устройства, циклов, не менее	5000

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наконечник НУ-10	1 шт.
Запасные части и принадлежности	
Пружина	3 шт.
Ключ	1 шт.

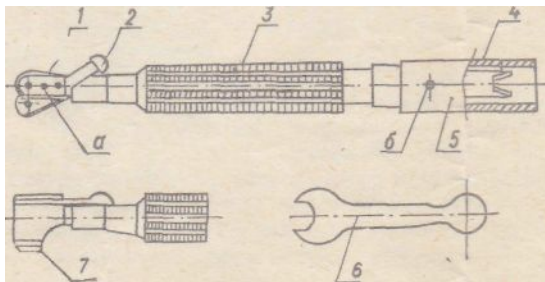


Рис. 1 Наконечник угловой НУ-10:

1 — головка; 2 — пружина; 3 — корпус; 4 — ось с поводком;
5 — гильза; 6 — ключ; 7 — гайка.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт в течение гарантийного срока

Наконечник углсн|вй НУ-10_____ =_____
Модель_____ ТУ 64-1-3001—77
Дата _____ изготовления*_. 1987
Приобретен _____
(заполняется торгующей организацией)

Принят на гарантийное обслуживание

города

М. П.

**Подпись руководства
ремонтного предприятия**

М. П.

**Подпись руководства
учреждения-владельца.**

Высылается ремонтным предприятием «Медтехника» в адрес завода-изготовителя и служит основанием для предъявления счета на оплату за произведенный ремонт в течение гарантийного срока.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения — 3 года со дня изготовления.

Гарантийный ремонт изделий медицинской техники осуществляется ремонтным предприятием системы «Медтехника», обслуживающими учреждения здравоохранения в данной области, крае, республике (включая учреждения других ведомств), за счет заводов-изготовителей.

Если изделие в период гарантийного срока вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение — владелец изделия.

Контролер_____ Упаковщик.
(условный номер) (условный номер)

Дата_____ Дата_____.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель тара гарантирует нормальную работу изделия в течение двенадцати месяцев при соблюдении правил эксплуатации и хранения, установленных настоящим паспортом.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения — 3 года со дня изготовления.

Предприятие систематически работает над улучшением конструкции изделия, поэтому возможны некоторые ее изменения, отраженные в настоящем паспорте!

Замечания о неисправностях, обнаруженных во время эксплуатации изделия, а также пожелания по усовершенствованию конструкции просим сообщать по адресу:

252655, Киев, ГСП, пр-т Красных казаков, 21,

Киевское производственное объединение «Медаппаратура».

По вопросу гарантийного ремонта обращайтесь в Киевское производственное объединение «Медмтаратура» или в ремонтные мастерские мед^хники.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Наконечник угловой НУ-10 подвергнут на КПО «Медаппаратура» консервации согласно требованиям, техническими условиями.

1987Г

Дата консервации _____
Срок консервации _____

Консервацию произвел.

Изделие после консервации при ял__

II. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Наконечник угловой НУ-10 упакован на КПО «Медаппаратура» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки- 1987Г

Упаковку произве^

Изделие после упаковки принял..