

Министерство приборостроения, средств автоматизации  
и систем управления СССР

**СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ**

**ЛАМПА «СОЛЛЮКС»  
СТАЦИОНАРНАЯ ЛСС-6М**

**П А С П О Р Т  
6-000-ОМ ПС**

**Библиотека Ладовед  
ОСР Войкин Ю. В. 2008г.**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Лампа «Соллюкс» стационарная ЛСС-6М предназначена для проведения общих и местных светотепловых процедур в физиотерапевтических кабинетах лечебных учреждений.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                                                                                                             |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Источник излучения                                                                                                          | Лампа<br>ЗК220-230-300<br>ТУ 16-545.401—82 |
| Напряжение сети, В                                                                                                          | 220±10%                                    |
| Мощность, Вт                                                                                                                | 300                                        |
| Частота, Гц                                                                                                                 | 50                                         |
| Расстояние от края кольца облицовочного до облучаемой поверхности, мм                                                       | 300                                        |
| Рабочий диаметр облучаемой поверхности, мм                                                                                  | 400                                        |
| Температура нагрева облучаемой поверхности, °С                                                                              | 45+10                                      |
| Масса, кг, не более                                                                                                         | 7,5                                        |
| Установленный срок службы, лет, не менее                                                                                    | 3,5                                        |
| Средний срок службы, не менее                                                                                               | 7                                          |
| Критерием предельного состояния ламп является технико-экономическая нецелесообразность восстановления их работоспособности. |                                            |
| Класс защиты II по ГОСТ 12.2.025—76.                                                                                        |                                            |

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАРКИ


- 3.1. Излучатель (без лампы накаливания), шт. . . . . 1
- 3.2. Штатив:
  - труба 1, шт. . . . .
  - труба 2, шт. . . . .
- 3.3. Основание, шт. . . . .
- 3.4. Лампа ЗК220-230-300 ТУ 16-545. 401—82, шт. . . . .
- 3.5. Паспорт, экз. . . . .

## 4. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

4.1. Лампа «Соллюкс» стационарная ЛСС-6М (рис. ) состоит из излучателя 1, штатива и основания 9.

4.2. В штатив входит труба 1 (5) и труба 2 (7)

Излучатель устанавливается на штативе с помощью муфты 2. Его можно поворачивать вокруг оси штатива и перемещать вверх и вниз. Положение излучателя фиксируется зажимным маховиком 3 и предохранителем 4 (при необходимости).

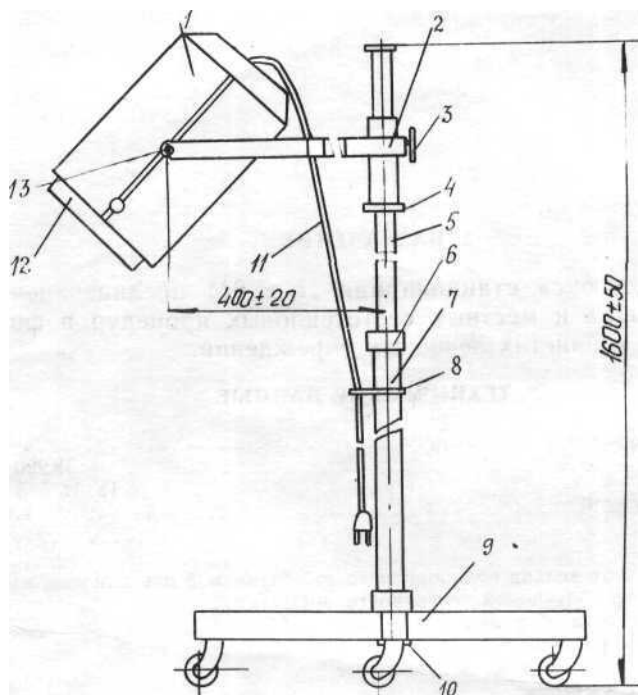

Общий вид лампы ЛСС-6М

4.3. Основание смонтировано на роликах, которые позволяют перемещать лампу по полу.

4.4. Для закрепления шнура сети // на трубе 7 установлен хомут 8.

## 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При замене лампы накаливания, дезинфекции и удалении пыли изделие отключить от сети.

## 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Сборку лампы «Соллюкс» производить следующим образом:

6.1. Трубу 7 вставить в основание 9 и закрепить гайкой 10.

6.2. Трубу 5 вставить в муфту 2 излучателя и закрепить маховиком 3.

6.3. Соединить трубы и закрепить их с помощью винта; на место соединения надвинуть колпачок 6.

6.4. Для установки лампы накаливания снять переднюю стенку 12. Лампу установить, стенку снова закрепить.

Для проведения процедуры необходимо установить излучатель в нужное положение.

6.5. После установки излучателя закрепить его ручками 13 и подключить к сети.

6.6. По истечении указанного врачом времени процедуру прекратить и лампу отключить от сети.

## **7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Техническое обслуживание лампы «Соллюкс» заключается в санитарной обработке наружных поверхностей 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177—77 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос».

## **8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

Лампы в упаковке транспортируются закрытым транспортом, кроме неотапливаемых отсеков самолетов, при температуре воздуха от  $-50^{\circ}$  до  $+50^{\circ}$  С и относительной влажности воздуха до 100% при  $25^{\circ}$  С.

## **9. РАСКОНСЕРВАЦИЯ**

При расконсервации лампы протереть детали марлевым тампоном, смоченным спиртом или бензином. Обильное смачивание не рекомендуется.

## **10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ**

10.1. Лампы следует хранить в закрытом помещении при температуре от  $+5^{\circ}$  до  $+40^{\circ}$  С и относительной влажности воздуха не более 80% при  $25^{\circ}$ С.

10.2. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## **11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

11.1. Завод гарантирует соответствие лампы требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода лампы в эксплуатацию.

11.3. В течение гарантийного срока завод безвозмездно ремонтирует или заменяет лампу и ее части, кроме лампы ЗК 220-230-300, по предъявлении гарантийного талона.

11.4. Предельный срок защиты без переконсервации — 7 лет.

## 12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1. В случае отказа лампы или неисправности ее в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружении некомплектности при ее первичной приемке владелец лампы должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, по которому должен прибыть представитель завода или предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, номер телефона;

дефектную ведомость;

гарантийный талон.

12.2. Все представленные рекламации регистрируются потребителем в таблице.

| Дата отказа или возникновения неисправности | К-во часов работы прибора до возникновения отказа или неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата надравл. рекламации | Меры, принятые по рекламации | Примечание |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|
|                                             |                                                                     |                                  |                          |                              |            |

## 13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Лампа «Соллюкс» ЛСС-6М УХЛ4.2 соответствует техническим условиям ТУ 64-1-243—77 и признана годной к эксплуатации.

Лампа подвергнута консервации согласно требованиям технических условий. Вариант защиты ВЗ-1 вариант упаковки ВУ-1 ОСТ 64-1-69—80.

*Дата консервации* \_\_\_\_\_

*Срок консервации* \_\_\_\_\_

*Консервацию произвел* \_\_\_\_\_

М. П.

*Дата выпуска* \_\_\_\_\_

*Ответственный за приемку* \_\_\_\_\_

Свердловский завод электромедицинской аппаратуры (ЭМА)  
620151, г. Свердловск, а/я 164. Расчетный счет 263202  
в Горуправлении Госбанка. Тел. 57-08-72

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
**на ремонт (замену) в течение гарантийного срока**  
Лампа «Соллюкс» стационарная ЛСС-6М ТУ 64-1-243—77

Помер и дата выпуска \_\_\_\_\_  
(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен \_\_\_\_\_  
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию \_\_\_\_\_  
(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города

*Подпись руководителя  
и печать ремонтного предприятия*

*Подпись руководителя  
и печать учреждения-владельца*